

Depois do duplo clique no icone do Interprete Tico ,automaticamente abre a presente janela. Com um menu superior e uma folha em branco



O Interpreter Tico permite o usuário usar as pranchas de comunicação superando assim as suas limitações na comunicação. Está tecnologia assitiva fornece o acesso através do acesso direto e indireto (varredura).

Área de Interpretação: O lugar onde o usuário carrega uma das várias pranchas do projeto TICO .

Área de acumulação: onde o usuário coloca as células selecionadas

Abrir Ctrl-A


Salir Ctrl-S

O primeiro passo:

Clica na opção arquivo do menu superior, e automaticamente será apresentada o sub-menu com duas opções. A primeira opção permite abrir o arquivo criando no editor e a ultima "salir" permite sair do sistema





Ao clicar na opção abrir automaticamente abre a janela ,onde o usuário pode percorrer as pasta e procurar a pasta onde se encontra o projeto que pretende usar.Em seguida seleciona-se o projeto e clica-se na opção open,caso contrário clica na opção cancel

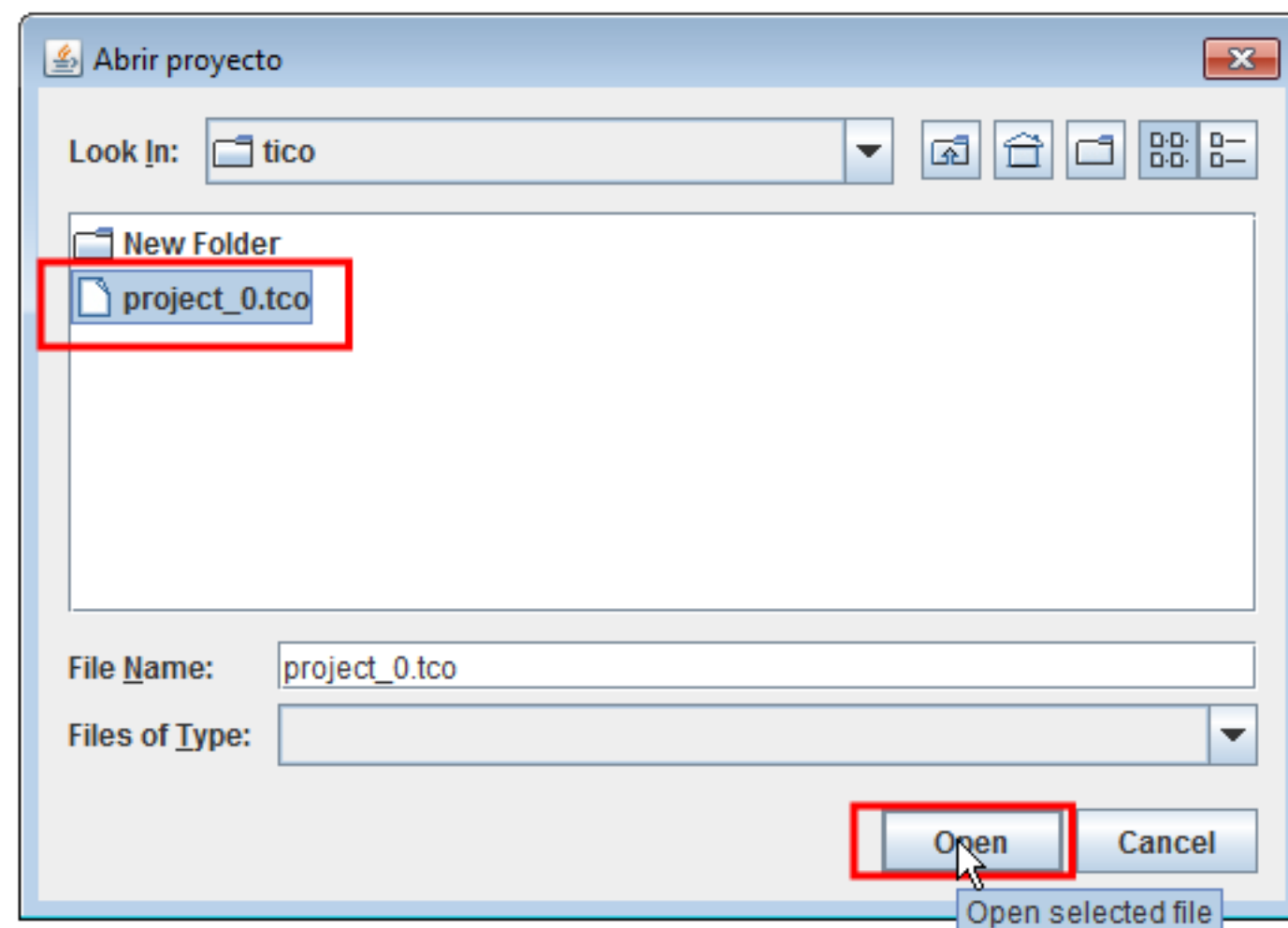

# O q u e r e s c o m e r ?

Automaticamente é aberta a prancha selecionada pelo usuário na ação anterior

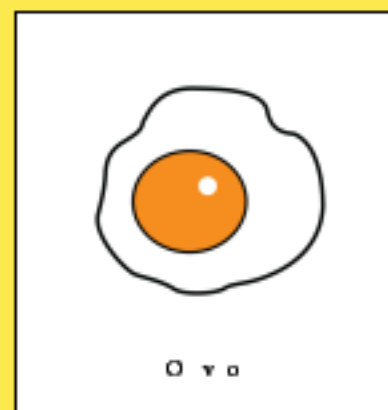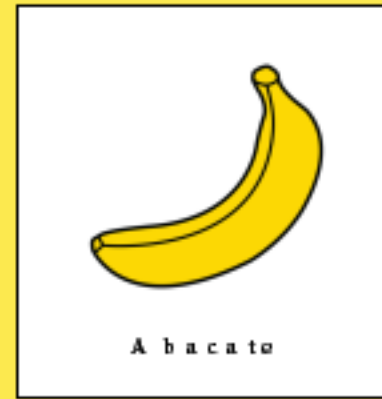

Opciones del intérprete  
Preferencias

A segunda opção do menu é constituída por duas opções ,a primeira opção permite o usuário escolher a forma de acesso na aplicação e a segunda permite escolher o idioma.



## O q u e r e s c o m e r ?



A b a c a t o



A b a c a t o



A b a c a t o



A b a c a t o



O v o



L a r a n j a



c o g u m e l o



S a l i r



B o r r a r c o l d a



B o r r a r c o l d a s

Apenas o usuario poder alterar o idioma do sistema em 4 linguas: Espanhol; Ingles; Frances; e cantala

Depois de seleccionada a opção "del Intérprete" automaticamente abre a presente janela

## O q u e r e s c o m e r ?

Opciones del intérprete

Imagen del cursor

Sin imagen

Desde Galería Seleccionar Borrar

Número máximo de celdas acumuladas 5

Espera del cursor en segundos

1 10 20

Modo de ratón

Selección directa  Barrido automático  Barrido manual

Aceptar Cancelar

Imagem cursor: Selecione a imagem para o cursor do mouse, caso não seleccionada a imagem, o sistema usa uma imagem padrão do mouse

O número máximo de células acumuladas: Indica o número máximo de células que podem acumular-se na área de acumulação.

Espera del cursor en segundos: Permite definir a tempo do saltos da varredura automática.  
Modo de ratón: Permite escolher o modo de acesso ao Intérprete TICO



A b a c a t o



e l o



S a l i r



B o r r a r c e l d a






B o r r a r c e l d a s



A opção "Preferencias" permite definir o idioma






# O q u e r e s c o m e r ?

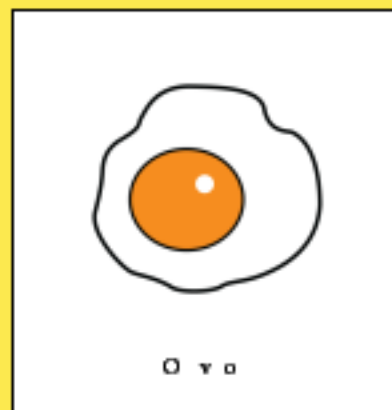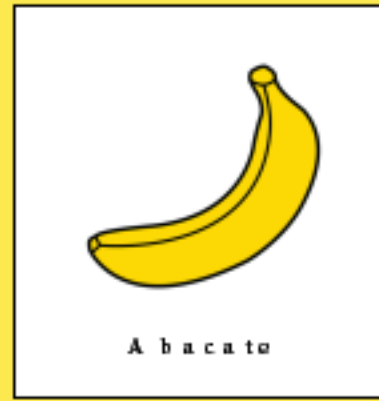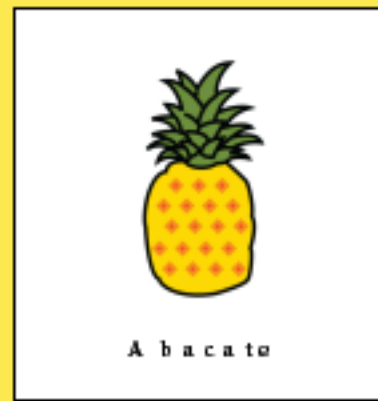


O sistema só possui os seguintes idiomas: Espanhol; Inglês Catala e Frances, não possui a versão em português Brasileiro ou de Portugal

## O q u e r e s c o m e r ?

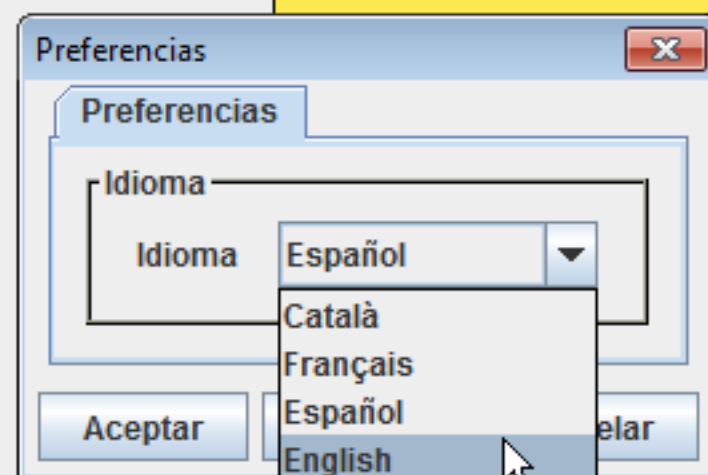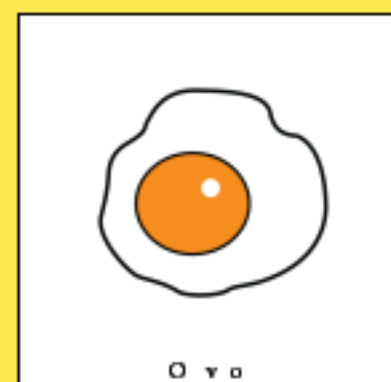
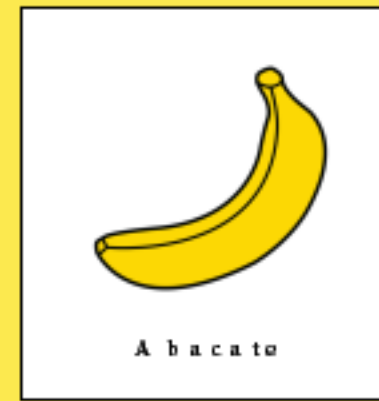


Depois de selecionada a opção preferencias Automaticamente aparece a janela de seleção do idioma .A janela possui uma caixa de seleção de opção do idioma

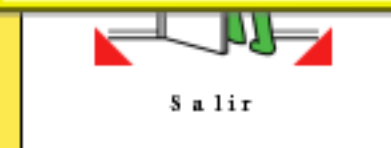



# O q u e r e s c o m e r ?

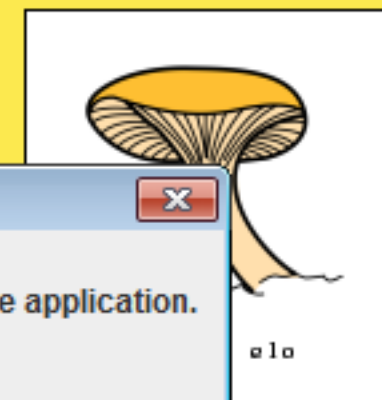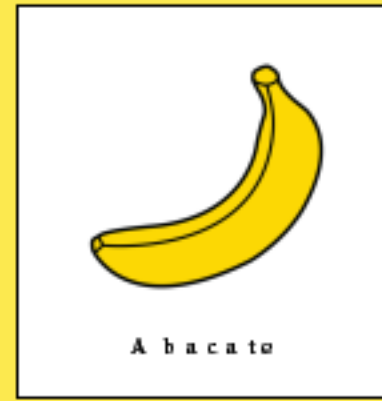

Preferencias

Preferencias

Idioma

Idioma English

Aceptar Aplicar Cancelar

Language changed

In order to make effective the language change you have to restart the application.

OK

Depois de selecionado o idioma é necessário fazer restart do sistema TICO de modo a poder assumir as configurações do idioma



← →



- Comenzar Ctrl-F5
- Parar Escape
- Leer Ctrl-F7
- Borrar celda Ctrl-Z
- Borrar celdas Ctrl-F8

## O q u e r e s c o m e r ?

A opção "Ações" é constituída por 5 ações a primeira permite iniciar a seleção das imagens e colocar na área de acumulação das células, a segunda opção permite parar a seleção, a terceira permite fazer a leituras das células acumuladas na área da acumulação das células selecionadas, a quarta opção permite apagar a ultima célula na área da acumulação e ultima opção permite apagar todas as células da área da acumulação.

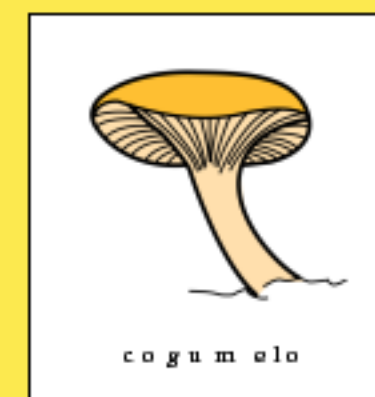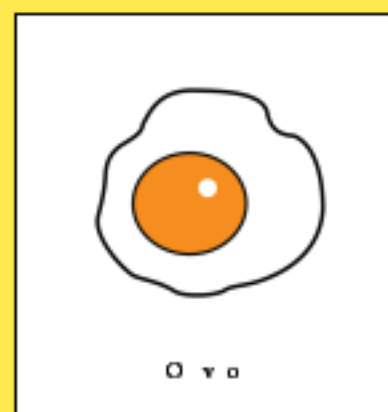

## O q u e r e s c o m e r ?

A opção validação permite validar as configurações do Intérprete Tico de acordo as limitações específicas de cada usuário.



A b a c a t o



A b a c a t o



A b a c a t o



A b a c a t o



O v o



L a r a n j a



c o g u m e l o



S a l i r





B o r r a r c o l d a



B o r r a r c o l d a s

## O q u e r e s c o m e r ?

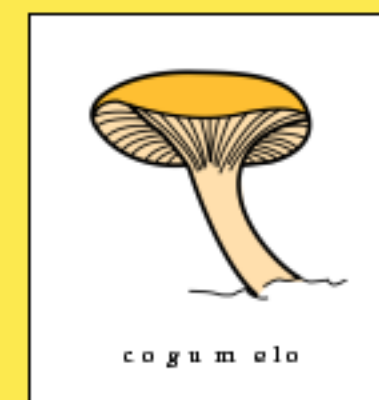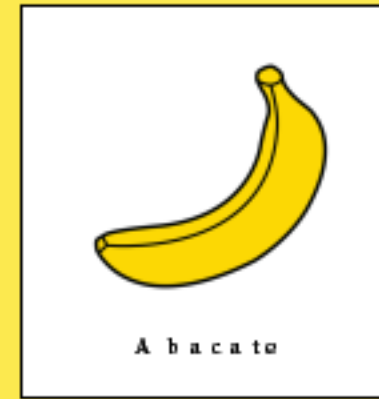

Selecionada a opção  
validação automaticamente  
aparece a janela onde se  
pode fazer a validação de  
acordo com a limitação de  
cada usuário.



Validar intérprete

Validar

Limitaciones

Grado de limitación motriz: 0/5

Grado de limitación cognitiva: 0/5

Grado de limitación sensorial: 0/5



# O q u e r e s c o m e r ?

A opção Ajuda contém informações indispensáveis, ou seja, exibe informações sobre a aplicação.

